



שעון פוקסי פולס

שעון רפואי עם GPS

פרטים להתחברות לאפליקציה

שם משתמש:

סיסמא:



מה בערכה

- שעון פוקסי פולס.
- כרטיס SIM לתקשורת, מובנה בתוך השעון.
- מטען USB.
- כבל לטעינה מגנטית.
- הוראות הפעלה בעברית.
- תעודת אחריות.

יצירת קשר

שעון פוקסי פולס והאביזרים הנלווים אליו הגיעו אליכם לאחר שנבדקו ונמצא תקינים ופעילים לשימוש. לכל בירור, שאלה, בעיה, תקלה, הערה או הארה ניתן לפנות לפוקסי פיינדר.

שירות לקוחות והזמנות: 077-5563137

אתר אינטרנט: <http://www.foxifinder.com>

כתובת אימייל: sales@foxifinder.com

השעון מאושר על ידי משרד התקשורת.

המטען מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.

עמוד	תוכן עניינים	תת סעיף	סעיף
5	סקירת השעון		1
5	תיאור כללי	1.1	
6	תכונות עיקריות	1.2	
7	מפרט טכני		2
8	הוראות חשובות לפני השימוש		3
9	תצוגת השעון		4
9	מבט חיצוני ותצוגה	4.1	
10	הסבר על הכפתורים	4.2	
11	הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב		5
11	הורדת האפליקציה	5.1	
12	מסך ראשי	5.2	
13	מסך היסטוריה	5.3	
14	שיחת טלפון	5.4	
14	ניווט לשעון	5.5	
14	מדידת דופק ולחץ דם	5.6	
15	מסך הגדרות	5.7	
16	איזור בטוח	5.8	
17	חירום SOS	5.9	
17	מסך אפשרויות		6
18	שינוי סיסמת כניסה		7
18	התראת נפילה - הסבר		8
19	חשוב לדעת		9

1. סקירת השעון

1.1 תיאור כללי

מזל טוב! אתם אוחדים בידכם בשעון פוקסי פולס: שעון טלפון רפואי עם GPS משולב WIFI ולחצן מצוקה. פוקסי פולס הינו שעון יד המכיל בתוכו את השילוב המושלם בין טכנולוגית סלולר, לטכנולוגית GPS עם WIFI לאיתור המיקום. פוקסי מאפשר לכם להיות בקשר עם הקרובים אליכם ובנוסף לאתר אותם בשעת מצוקה. כל אפשרויות השליטה על השעון מתבצעות באמצעות אפליקציית "פוקסי פיינדר".

1.2 תכונות עיקריות

- בכל רגע ניתן לצפות במיקום השעון.
- מענה אוטומטי לשיחות נכנסות.
- שיחות נכנסות לשעון.
- לחצן מצוקה SOS.
- שיחות יוצאות מהשעון - רק טעינה מגנטית נוחה.
- לשלושה מספרים שהוגדרו באפליקציה.
- עובד בכל העולם.
- מד דופק.
- תצוגת שעון דיגיטלי ואנאלוגית.
- מד לחץ דם.
- לבחירה רטט \ צלצול.
- חיישן נפילה.
- תזכורת לתרופות.
- מוגן מים.

2. מפרט טכני

מידע	שם
שעון פוקסי פולס Foxi Pulse גרסא 1.4	שם המוצר
49.0*40.0*14.5 מ"מ	גודל
52 גרם	משקל
GSM 850/900/1800/1900 דור 2	תדרים
GPS / WIFI / AGPS	איתור
עד 2.5 מטר	דיוק מערכת האיתור
IP67	מוגן מים
1.44 אינץ' תצוגת IPS	מסך
240x240	תצוגה
5V DC , טעינה מגנטית	טעינה
3.7V 500mAh	סוללה
מד דופק, מד לחץ דם, מד תאוצה (G)	חיישנים
-10 ~ 60 °C	טמפרטורת שימוש

3. הוראות חשובות לפני השימוש

לפני השימוש הראשוני בשעון, יש לקרוא בקפידה את ההסברים

- יש להטעין את הסוללה טעינה ראשונית מלאה לפחות שעתיים.
- השעון מוגן בפני מים עבור פעילות יום יומית של עונד השעון.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת לנקות את השעון והמטען. יש להשתמש במטלית יבשה.
- אין לחשוף את השעון והמטען לטמפרטורות גבוהות.
- אין לחבר את השעון למקור מתח שלא סופק בערכה.
- אין להחליף את הפתיל או התקע של המטען בעצמכם. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- במקרה של תקלה עם השעון ו/או המטען אין לנסות לתקן לבד. יש ליצור קשר עם התמיכה.
- ניתן להגדיר עד 3 מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת. יש לבחור בין 1-3 מספרים שישמשו את השעון. ההגדרה נעשית דרך האפליקציה כפי שיוסבר בהמשך מדריך זה.
- במידה והשעון מיועד לשימוש בחו"ל, יש לוודא שהמדינה שאליה אתם טסים נמצאת ברשימת המדינות שהשעון יכול לעבוד בהם. כמו כן, כאשר מבצעים מעבר בין מדינה למדינה, יש לוודא שהשעון מכובה לפני כניסה למטוס. לפרטים נוספים כנסו לאתר שלנו.

4. תצוגת השעון

4.1 מבט חיצוני ותצוגה



4.2 הסבר על הכפתורים

כפתור הדלקה \ מצוקה

- כאשר השעון כבוי, לחיצה ארוכה על הכפתור תדליק את השעון.
- כאשר השעון דלוק, לחיצה כ 3 שניות תפעיל מצב חירום SOS. השעון ישלח אות מצוקה לאפליקציה ויניסה לחייג לאנשי הקשר שהוגדרו מראש.
- כאשר השעון דלוק, לחיצה מהירה פעמיים תקריא את השעה באנגלית.

חיוג לאנשי קשר

חיוג לאנשי קשר זהו אייקון בתוך השעון. לחיצה על האייקון של המחברת תפתח את שלושת אנשי הקשר ותאפשר לחייג אליהם.


בדיקת דופק ולחץ דם

בדיקת דופק ולחץ דם באמצעות אייקון בתוך השעון. לחיצה על האייקון תאפשר לבדוק בצורה מקומית את הדופק ולחץ הדם.

5. הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב


5.1 הורדת האפליקציה

להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד או חפשו "פוקסי פיינדר" בחנויות האפליקציות

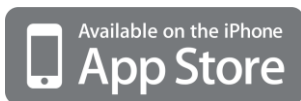

כניסה לאפליקציה מתאפשרת עם שם משתמש וסיסמא שקיבלתם במעמד ההזמנה. במידה ובצעתם הזמנה דרך משווק ואין ברשותכם שם משתמש וסיסמא, יש להתקשר לשירות הלקוחות: 077-5563137

5.2 מסך ראשי

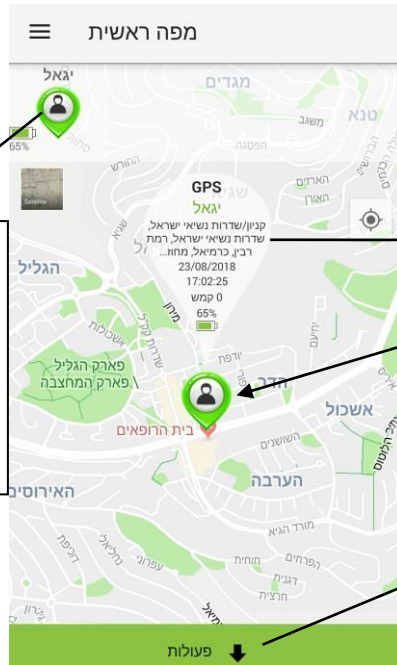

פאנל עליון – תצוגה של כל השעונים שברשותכם. צבעים: ירוק = מחובר צהוב = ללא קליטה אדום = שעון כבוי

המידע האחרון שהגיע מהשעון. חלון זה יופיע כאשר תלחצו על האייקון.


לחיצה על תפריט "פעולות" תאפשר לכם לבצע הגדרות שונות עבור השעון. בעמודים הבאים יוצגו האפשרויות של תפריט זה.



5.3 מסך היסטוריה

במסך זה תוכלו לצפות בהיסטורית המיקומים של השעון. יש לבחור תאריך רצוי והאפליקציה תראה את המיקום בטווח של 24 שעות לתאריך שבחרתם.

האפליקציה תציג שביל ירוק עם כל המיקומים של התאריך שבחרתם החל משעה 00:00 ועד לשעה 23:59. תוכלו לדפדף במיקומי ההיסטוריה באמצעות הלחצנים בצדדים:

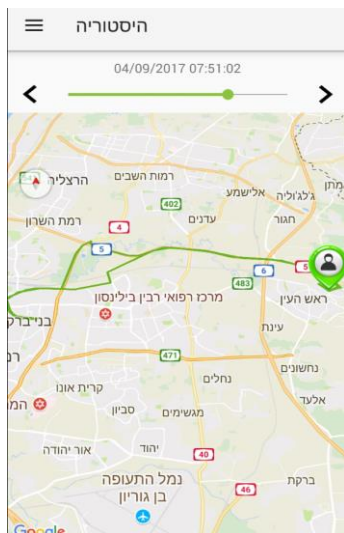



5.4 שיחת טלפון

לחיצה על כפתור זה תבצע שיחת טלפון לשעון. ניתן לחייג לשעון גם אם השעון נמצא מחוץ לישראל.



5.5 ניווט לשעון

לחיצה על כפתור הניווט תאפשר לכם לפתוח את אפליקציית Waze או "גוגל מפות" על מנת לבצע ניווט למיקום הנוכחי של השעון.




5.6 מדידת דופק ולחץ דם

מסך מדידת דופק ולחץ דם מאפשר לשלוח פקודה לשעון אשר מבקשת את המדדים של עונד השעון. כמו כן תוכלו לראות היסטוריית מדידות. חיישן הדופק נמצא מאחורי השעון בסמוך לנקודת הטעינה. ** שימו לב, מד הדופק אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או למדידת דופק על ידי אנשי מקצוע. במידה ויש ספק לגבי התוצאה, יש לפנות לרופא.



5.7 מסך הגדרות

מסך הגדרות מאפשר לכם לשלוט ישירות על השעון. להלן הסבר על חלק: ערוך פרופיל - שינוי שם השעון והאייקון

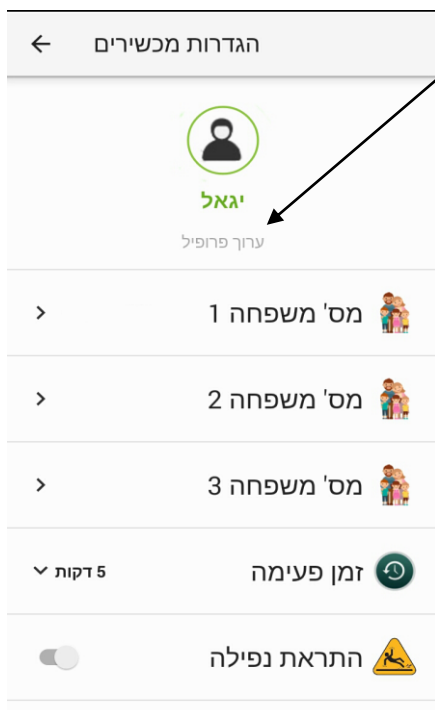

מספרי משפחה 1,2,3 אלו אותם מספרים עבור לחיצת SOS בשעון.

זמן פעימה – כל כמה זמן תרצו שהשעון יראה את מיקומו על המפה.

התראת נפילה – התראה כאשר עונד השעון נופל. הסבר על התראה זו בעמוד 18.

מענה אוטומטי – ברגע שתפעילו, כל שיחה נכנסת לשעון תתקבל באופן אוטומטי.

התראות – מאפשר להגדיר אילו התראות תרצו לקבל עבור השעון.

סוג + פרופיל – תוכלו להגדיר שעון אנאלוגי\דיגיטלי ורטט\צלצול.



5.8 איזור בטוח

- איזור בטוח מאפשר לכם לקבל התראה כאשר:
- השעון נכנס לאיזור מסויים (התראת כניסה).
 - השעון יצא מאיזור מסויים (התראת יציאה).
 - השעון היה אמור להיכנס לאיזור, אבל לא נכנס (התראת אמור להיכנס).
 - השעון היה אמור לצאת מאיזור, אבל לא יצא (התראת אמור לצאת).

מידע על איזור בטוח

שם איזור בטוח

בחר כתובת לאיזור הבטוח

מהו המרחק (במטרים) שברצונך להקיף סביב הכתובת?
20

מתי ברצונך לקבל התראה?

כניסה	יציאה	אמור להיכנס	אמור לצאת
-------	-------	-------------	-----------

פעיל

שמור


שם איזור בטוח – יש להכניס שם.
כתובת – יש לרשום את הכתובת של האיזור הבטוח. למשל כתובת הבית.
מרחק במטרים – כמה מטרים מסביב לכתובת ייחשב כאיזור בטוח.
התראה – יש לבחור אחת מארבעת האפשרויות.
ברגע שתבחרו "אמור להיכנס\לצאת" יופיע גם מסך לבחור יום ושעה. דוגמא ל"אמור להיכנס": המערכת תתריע במידה והשעון לא חזר הביתה בימים א'-ה' עד השעה 19:00.



לחיצה על כפתור זה משמעו השעון נמצא במצב חירום ואתם רוצים לאתר את השעון במידי. האפשרות הזאת תהפוך את זמן הפעימה ל 10 שניות, למשך 10 דקות. לאחר מכן זמן הפעימה המקורי יחזור באופן אוטומטי.


6. מסך אפשרויות

בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות:

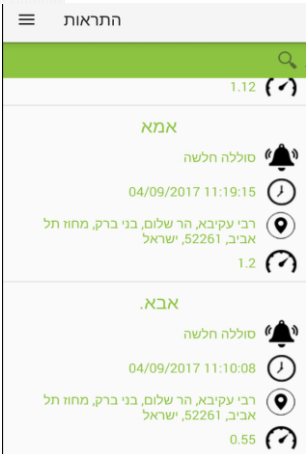

יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "התראות" ברשימה. מסך זה יציג לכם את כל ההתראות שהגיעו לשעון. ניתן לבצע חיפוש ולצפות בכל הנתונים: סוג התראה, תאריך ושעת קבלה, כתובת ומהירות.

7. שינוי סיסמת כניסה

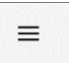ניתן לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה. כחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות: : יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "החשבון שלי". בתוך החשבון שלי תוכלו לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.

8. התראת נפילה - הסבר

כפי שהוזכר בעמוד 15 תחת מסך הגדרות, ניתן להפעיל ולכבות התראת נפילה. התראת נפילה הינה חיישן מיוחד שמזהה כאשר עונד השעון נפל. ברגע שזוהתה התראת נפילה, השעון יצפצף ויראה אייקון על המסך, לאחר הצפצוף תשלח התראת נפילה לאפליקציה. התראת הנפילה מצליחה לזהות כ 80% ממקרי הנפילה ולכן אין להסתמך על מערכת לזיהוי הנפילה בצורה מוחלטת. יתכן מקרה אשר חיישן הנפילה זיהה נפילה אך בפועל לא התרחשה נפילה (False positive). תרחיש זה קורה כאשר עונד השעון ביצע תנועה חדה עם היד. במידה וחיישן הנפילה מתחיל לצפצף ועונד השעון לא נפל, יש לגעת במסך והשעון לא ישלח התראה לאפליקציה.

9. חשוב לדעת

- ייתכנו אייקונים ויכולות נוספות בהמשך תהליך הפיתוח של האפליקציה.
- השעון הגיע אליכם יחד עם חבילת דקות לשיחות יוצאות. לאחר שמכסת הדקות תיגמר, תוכלו לרכוש חבילה נוספת דרך שירות הלקוחות.
- כאשר השעון ינסה להוציא שיחה (אם זה באמצעות כפתור ה SOS או באמצעות אייקון חיוג לאנשי קשר) יופיע על המסך אייקון של טלפון אשר מצוין כי השעון מנסה להוציא שיחה כעת.
- כברירת מחדל, השעון פתוח לשימוש בישראל בלבד. במידה וברצונכם להפעילו גם לחו"ל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- השעון מבצע איתור בטכנולוגיה כפולה: כאשר השעון בחוץ, יבוצע איתור באמצעות GPS. כאשר השעון בתוך מבנה סגור (בית, דיור מוגן, קניון וכדומה) יבוצע איתור באמצעות WIFI. אין צורך לחבר את השעון לאינטרנט WIFI של הבית ואין צורך להגדיר סיסמא של ה WIFI בתוך השעון. תהליך האיתור מתבצע באופן אוטומטי.



Foxi Pulse

שעון רפואי עם GPS

© כל הזכויות שמורות לחברת פוקסי פיינדר סיסטמס בע"מ •
משרדים: נורדיה • טלפון: 077-5563137 • פקס: 077-4702782 •
אימייל: sales@foxifinder.com • אתר אינטרנט: www.foxifinder.com